


Description du produit

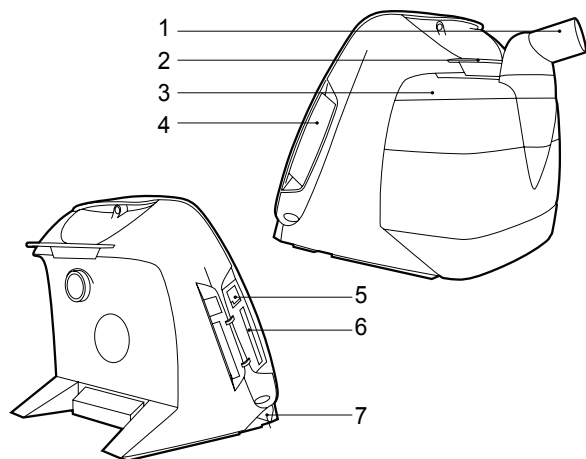


N°	ÉLÉMENT	N°	ÉLÉMENT
1	Sortie d'air	4	Admission d'air
2	Verrouillage du couvercle arrière	5	Connexion données
3	Humidificateur HA 01(en option)	6	Lecteur de la carte mémoire
		7	Entrée CC

Symboles utilisés dans le menu


ICÔNE	EXPLICATION
	La iSleep fonctionne
	Alarme réveil
	Humidificateur HA 01 actif
	Rampe active
	Panneau verrouillé (mode domicile)
	Panneau verrouillé (mode domicile) par le logiciel PC Breas iSleep

Raccourcis

Pour activer/désactiver la fonction de rampe pendant le fonctionnement de la iSleep : Appuyez sur la touche programmable de la Rampe jusqu'à ce que le symbole rampe apparaisse/disparaisse.

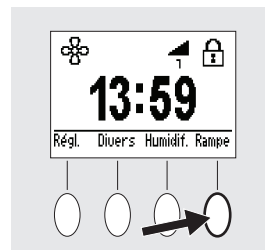

Pour activer/désactiver l'humidificateur pendant le fonctionnement de la iSleep : Appuyez sur la touche programmable Humidification jusqu'à ce que le symbole Humidification apparaisse/disparaisse.

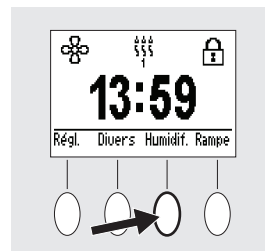

Contrôle de la iSleep avant utilisation

1. Raccordez un circuit patient neuf ou propre à la iSleep.
2. Branchez la iSleep au secteur.
3. Mettez en route la iSleep en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt du panneau avant. Vérifiez que la iSleep est bien en marche.
4. Placez le masque et ajustez-le.
5. Assurez-vous que les paramètres soient conformes à la prescription.

La iSleep est à présent prête à l'emploi.

Breas Medical AB, Företagsvägen 1,
SE-435 33 Mölnlycke, Sweden,
Téléphone +46 31 86 88 00, Fax: +46 31 86 88 10,
breas@breas.com
Pour contacter votre distributeur local
connectez vous sur : www.breas.com



iSleep[®]
by Breas



iSleep 20+/20i/22/25

Guide simplifié de l'utilisateur

Doc. 004458 Fr X-2

Guide simplifié d'utilisation



Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit iSleep. La iSleep est un appareil délivrant une Pression Positive Continue (PPC) que vous pouvez utiliser chez vous. Ce Guide simplifié vous permet de commencer facilement votre traitement. Notez que la iSleep 20+ est utilisée comme exemple. L'écran de la iSleep 20i/22/25 peut être différent.




Ceci n'est pas un guide complet de la iSleep. Pour des instructions complètes, consultez le manuel.

Mise en route / Arrêt

1. Contrôlez le branchement de l'appareil à l'alimentation secteur.
2. Démarrez/arrêtez la iSleep en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.

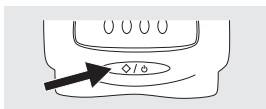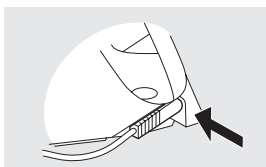

Utilisation du menu

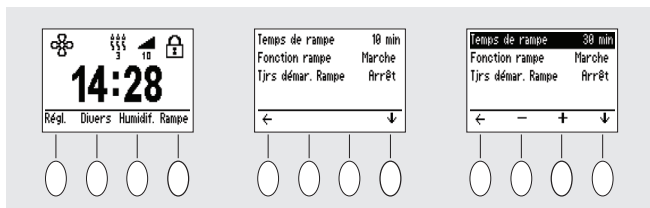

Utilisez les 4 boutons situés sur l'écran pour naviguer dans le menu. Vous pouvez modifier les réglages de l'appareil, ceux de l'alarme de réveil, de l'humidificateur et de la rampe et consulter les paramètres du traitement. En fonction de votre position dans le menu, les boutons offriront différentes fonctions. Voici les icônes utilisées :





ICÔNE	EXPLICATION
+	Augmente la valeur sélectionnée ou active une fonction.
-	Abaisse la valeur sélectionnée ou désactive une fonction.
←	Remonte d'un niveau dans le menu.
↓	Ouvre le menu ou sélectionne la valeur en-dessous.

Carte mémoire



La iSleep ne peut copier et transférer des données à la carte mémoire que lorsqu'elle est en mode veille (pas en fonctionnement).


1. Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte sur le côté de la iSleep.
2. Dans le menu principal, choisissez « Divers » et accédez à la page « Carte mémoire ».

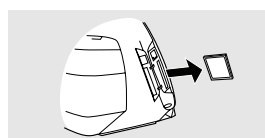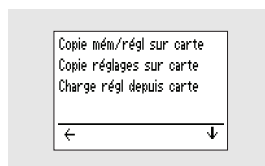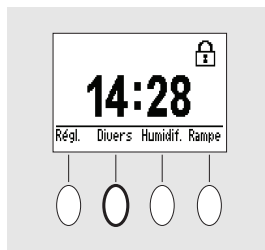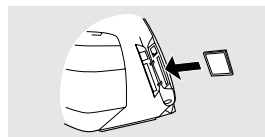

3. Sélectionnez la mesure souhaitée et attendez pendant que la iSleep se charge ou sauvegarde sur la carte mémoire.
4. Retirez la carte mémoire du lecteur de carte sur le côté de la iSleep.

Fonction Pause


1. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
2. La fonction Pause est activée et la iSleep fournit un faible débit pendant 10 minutes. Au-delà, la machine s'arrête automatiquement.

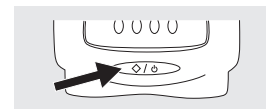


Pour reprendre le traitement, commencez à respirer dans le masque ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt brièvement.

Réveil

Naviguez dans le menu du réveil pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsqu'il est activé, le réveil émet une alarme à l'heure réglée.

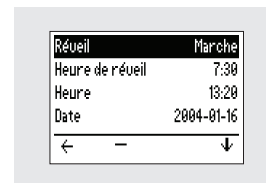


Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour désactiver le signal si une alarme s'est déclenchée.

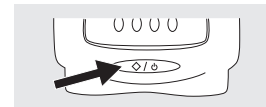

Nettoyage et remplacement du filtre à air du patient

Le filtre à air est situé sur le côté de la iSleep.

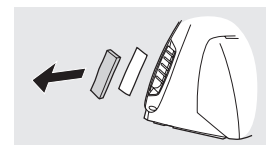

Il existe deux types de filtre :

Filtre lavable (gris, obligatoire)

Remplacez le filtre lavable au moins une fois par an. Lavez le filtre une fois par semaine au moins.

Filtre à usage unique (blanc, en option)

Remplacez le filtre une fois toutes les quatre semaines ou plus souvent en cas de pollution élevée ou de haute teneur en pollen.