


Positional Sleep Apnea Therapy



Le dispositif Night Shift est une thérapie brevetée et éprouvée cliniquement pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil positionnelle (POSA). Night Shift peut être portée autour du cou ou de la poitrine. Après avoir laissé à l'utilisateur le temps de s'endormir dans n'importe quelle position, il commence à vibrer doucement lorsque l'utilisateur tente de dormir sur le dos. La vibration augmente ensuite progressivement en intensité jusqu'à ce que l'utilisateur change de position. Night Shift est un moniteur intelligent et interactif qui permet également aux patients et aux cliniciens de suivre la qualité du sommeil et l'efficacité thérapeutique via l'application Night Shift sur les appareils iOS et Android ou un portail Web. Night Shift peut également être associé à un oxymètre de poignet pour dépister le POSA et/ou évaluer les bénéfices d'une thérapie combinée.

Le sommeil en décubitus dorsal a un impact sur plus de 70 % des patients diagnostiqués avec un SAOS léger, modéré ou sévère

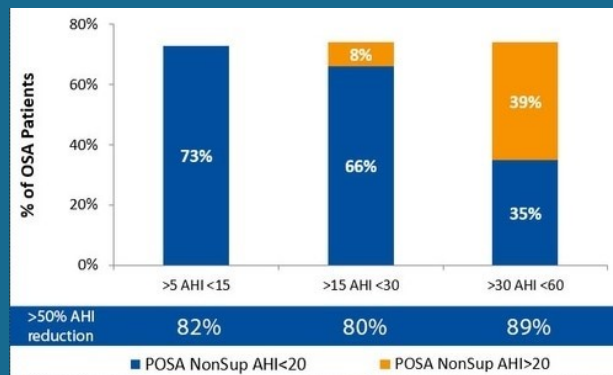

55 % des patients intolérants à la PAP bénéficieraient d'un évitement en décubitus dorsal seul ou en association avec un traitement par appareils buccaux



## Caractéristiques

### Choix de l'emplacement


Des rapports complets fournissent un examen approfondi de la qualité du sommeil et de l'adaptation comportementale du patient :

- Surveillance de l'efficacité avec laquelle l'utilisateur a dormi et le degré de fragmentation du sommeil
- Évaluation de l'association entre les ronflements bruyants et la qualité du sommeil
- Détermination si le ronflement et la mauvaise qualité du sommeil se limitent au sommeil sur le dos
- Suivi de l'adaptation comportementale à la thérapie de position
- Comparer l'efficacité d'autres thérapies contre l'AOS ou le ronflement avec et sans thérapie de position

## Rester connecté


Utilisez le portail ou l'application mobile pour :

- Saisir les informations de garantie
- Télécharger ou afficher des rapports
- Ajuster les paramètres de l'appareil


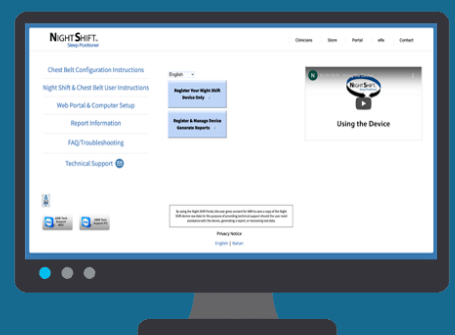


Connectez-vous à votre ordinateur pour utiliser le portail

Utilisez l'application sur votre appareil iOS ou Android pour :

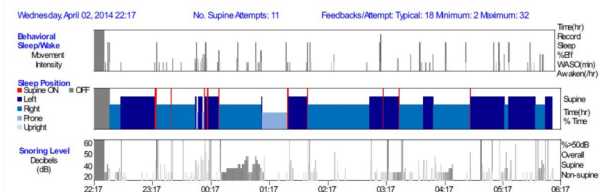

Voir le rapport détaillé

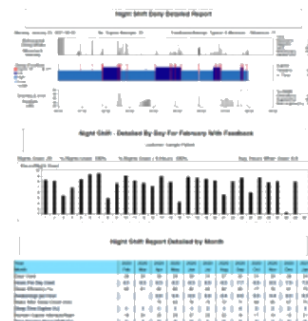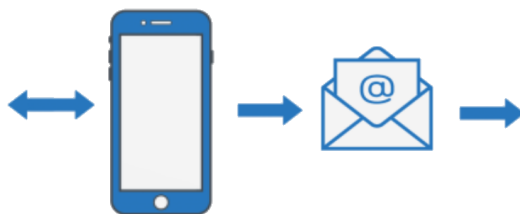

Email détaillé, observation et rapport annuel depuis l'app mobile



## 365 Days of Monitoring



### Durée minimum de 15 min pour un retour

Les patients peuvent d'endormir dans n'importe quelle position



### Charge longue durée


Une seule charge dure jusqu'à 3 nuits



### Poids léger

Ne pèse que 46 grammes avec la sangle de cou

## Exemple de Rapport

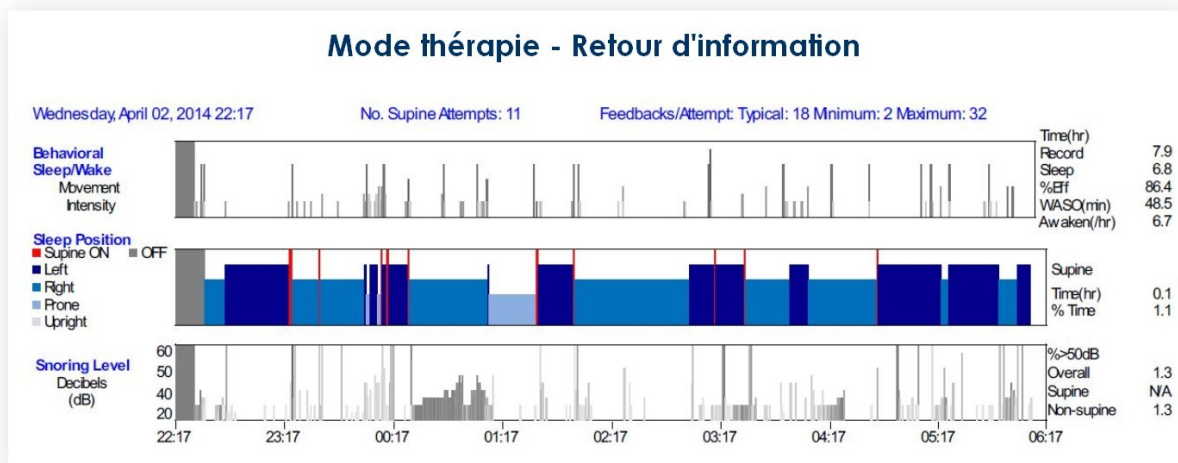

## Spécifications

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (cm)                    | Long. 5.6 x Larg. 3.8 x Epai. 1.3 |
| Poids                              | <46 grammes                       |
| Batterie rechargeable              | 200mAh Lithium Polymère           |
| Garantie fabrication               | 2 ans                             |
| Garantie Batterie & moteur vibrant | 1 an                              |
| Garantie sangle cervicale          | 6 mois                            |



"Solutions Respiratoires Innovantes"  
"Innovative Respiratory Solutions"

L3 Médical  
8, Rue de la pierre Millière  
38070 Saint Quentin Fallavier  
France

Tél.: +33(0)474 825 727  
Fax.: +33(0)474 827 938  
contact@l3medical.com  
www.l3medical.fr

